



Cómo Cargar un Dispensador de Cubrecalzados Bootie Butler®

BootieButler™



PASO 1:

La característica patentada “Fácil de Cargar” de Bootie Butler deja que los paquetes de cubrecalzados sean cargados en el dispensador. No hay que usar ninguna herramienta para ajustar las vías.



PASO 2:

Para instalar los cubrecalzados, quite la bolsa de plástico del paquete, dejando intacta la cinta atada. La flecha en el lomo debe señalar hacia abajo.



PASO 3:

Alinee las “pinzas” azules con las ranuras de las vías auto ajustes. Asegure que **TODAS LAS PINZAS** entren en las ranuras y que las puntas redondeadas se mantengan en la parte exterior de la vía (como se ve en la foto).



PASO 4:

Para dejar que las pinzas entren fácilmente en las vías, empuje hacia abajo y hacia adelante, manteniendo el paquete a un ángulo de 90 grados. Utilice dos manos para que las pinzas se metan en las vías.



BootieButler™

Cómo Cargar un Dispensador de Cubrecalzados Bootie Butler®



PASO 5:

Empuje el paquete en la máquina hasta una distancia de 3-4 pulgadas **DEBAJO** de la parte más alta de las vías. Desate y quite la cinta amarilla y el lomo de cartón.



PASO 6:

Ponga una mano en la parte superior del paquete mientras presionando los cubrecalzados. Saque las anillas anaranjadas, jalándolas hacia arriba y hacia afuera.




PASO 7:

Empuje el paquete hacia abajo hasta que el paquete se detenga en la parte inferior de la "lengua" de resistencia. (Carga 1 paquete)



STEP 8:

Para preparar el dispensador, mire el frente y saque la parte delantera del cubrecalzado expuesto. Luego, con el dedo índice y el meñique, jale suavemente hasta que el primer cubrecalzado "cierre" en su sitio en las asas en cada lado del dispensador.

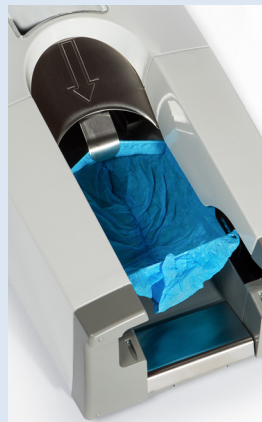

STEP 9:

¡Adecuadamente cargado y listo para usar!

Instalación del Mango:

Inserte el mango del quitador en la parte superior del Dispensador.

Alinee los 4 tornillos del mango con los agujeros correspondientes de la Unidad Dispensadora.

Note: Esta foto muestra la unidad por detrás.

