



## Cómo Cargar un Dispensador de Cubrecalzados Bootie Butler®

BootieButler™



### PASO 1:

La característica patentada “Fácil de Cargar” de Bootie Butler deja que los paquetes de cubrecalzados sean cargados en el dispensador. No hay que usar ninguna herramienta para ajustar las vías.



### PASO 2:

Para instalar los cubrecalzados, quite la bolsa de plástico del paquete, dejando intacta la cinta atada. La flecha en el lomo debe señalar hacia abajo.



### PASO 3:

Alinee las “pinzas” azules con las ranuras de las vías auto ajustes. Asegure que **TODAS LAS PINZAS** entren en las ranuras y que las puntas redondeadas se mantengan en la parte exterior de la vía (como se ve en la foto).



### PASO 4:

Para dejar que las pinzas entren fácilmente en las vías, empuje hacia abajo y hacia adelante, manteniendo el paquete a un ángulo de 90 grados. Utilice dos manos para que las pinzas se metan en las vías.



## Cómo Cargar un Dispensador de Cubrecalzados Bootie Butler®

**BootieButler™**



### **PASO 5:**

Empuje el paquete en la máquina hasta una distancia de 3-4 pulgadas **DEBAJO** de la parte más alta de las vías. Desate y quite la cinta amarilla y el lomo de cartón.



### **PASO 6:**

Ponga una mano en la parte superior del paquete mientras presionando los cubrecalzados. Saque las anillas anaranjadas, jalándolas hacia arriba y hacia afuera.




### **PASO 7:**

Empuje el paquete hacia abajo hasta que el paquete se detenga en la parte inferior de la "lengua" de resistencia. (Carga 1 paquete)



### **STEP 8:**

Para preparar el dispensador, mire el frente y saque la parte delantera del cubrecalzado expuesto. Luego, con el dedo índice y el meñique, jale suavemente hasta que el primer cubrecalzado "cierre" en su sitio en las asas en cada lado del dispensador.

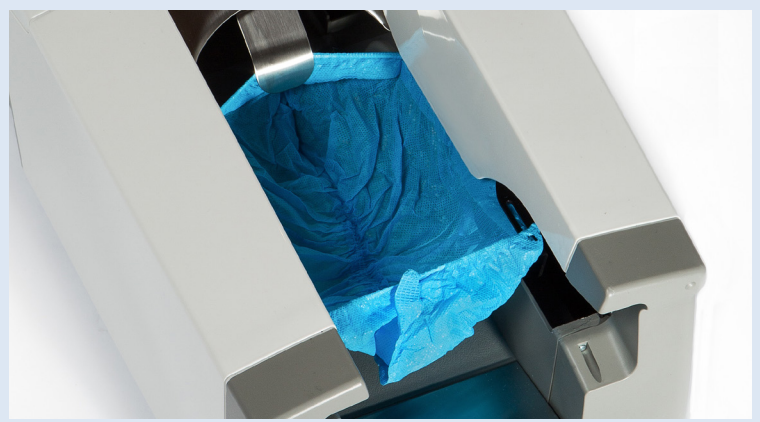

### **STEP 9:**

¡Adecuadamente cargado y listo para usar!